



Стул для ванн Barry Viola



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства стула для ванн Barry Viola.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Стул для ванн является изделиями, которое помогает людям с нарушенной координацией движения более удобно и безопасно принимать водные процедуры.

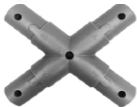
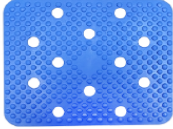
1.2 Технические характеристики:

- Алюминиевый каркас с порошковым напылением.
- Сиденье и спинка из гигиенического, ударопрочного пластика.
- Сиденье с отверстиями для отвода воды.
- Противоскользящий коврик на сиденье.
- Регулируемая высота сиденья.
- Ножки с противоскользящими наконечниками.
- Параметры сиденья 400 на 330 мм.
- Максимальная нагрузка 150 кг.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.

2.1 Важные предупреждения:

- Перед использованием убедитесь, что изделие и его части не имеют повреждений.
- Следует протирать изделие мягким моющим средством и водой, затем высушить.
- Убедитесь, что все части изделия надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на изделие не должна превышать 150 кг.

Составные части

Сиденье  ① x1	Спинка  ② x1	Подлокотник  ③ x2	Центральный кронштейн  ④ x1
Усиленная перекладина  ⑤ Сторона А x2 ⑥ Сторона В x2	Трубка спинки  ⑦ x2	Поперечные рамы  ⑧ x1	
Ножка-опора  ⑨ x4	Болт 5,5 см  ⑩ x4	Болт 3,5 см  ⑪ x9	Болт  ⑫ x4
Шайба  ⑬ x17	Шестигранный ключ  ⑭ x1	Противоскользящий коврик  ⑮ x1	Запасные части  ⑩ ⑪ ⑫ x1 ⑬ x3

Инструкция по сборке

1

Подготовка сиденья

- Переверните сиденье (#1) внутренней стороной вверх.
- Расположите переднюю часть от себя.
- установите центральный кронштейн (#4) в паз в центре основы сиденья (см. рисунок).



2

Сборка рамы сиденья

- Вставьте все 4 поперечины рамы (#5 и #6) в пазы центрального кронштейна (#4).
- Зафиксируйте болтами 3,5 см (#11) и шайбами (#13).
- Дополнительно закрепите болт 3,5 см (#11) в центральном отверстии кронштейна (#4).



3

Установка спинки

- Приложите вертикальную трубку спинки (#7) к поперечинам рамы.
- Совместите монтажные отверстия.
- Зафиксируйте болтами 5,5 см (#10) и шайбами (#13).

Повторите для второй трубки.

Критично: Сторона с овальными отверстиями должна крепиться к сиденью!



4

Регулируемые ножки

- Вставьте ножку-опору (#9) в конец вертикальной стойки рамы.
- Нажмите на пружинную кнопку до щелчка.

Повторите для остальных 3 ножек.

Регулировка высоты:

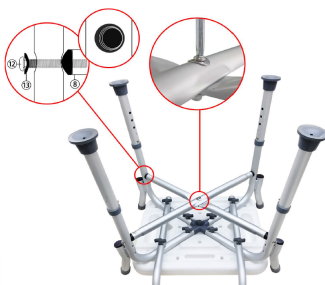
Используйте кнопку-фиксатор на ножках.



5

Усиление конструкции

- Установите усиливающую перекладину (#8) на верхние трубы рамы.
- Совместите отверстия, вставьте болты (#12) с шайбами (#13).
- Затяните все болты (включая центральный) шестигранным ключом (#14).



6

Крепление спинки

- Переверните собранный каркас.
- Присоедините спинку (#2) к вертикальным трубкам (#7) болтами 3,5 см (#11) и шайбами (#13).



7

Установка подлокотников

- Зафиксируйте оба подлокотника (#3) на верхних стойках рамы, нажав на пружинные кнопки до щелчка.

Регулировка высоты:

Выдвиньте ножки и зафиксируйте кнопкой в нужном пазе.



3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утрачены. Замените насадки в случае необходимости.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Артикул № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Средства для самообслуживания и ухода: стулья для ванн: арт. 10570, арт. 10570/Т, сиденье для ванн: арт. арт. 10441.

Произведено: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),

8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C

Поставщик: ООО «СИМС-2» (Россия)

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

**Более подробная информация на сайте www.sims2.ru