



Поворотное сиденье для ванны со складной спинкой Барри Твист (Barry Twist)



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
4 .УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик сиденья для ванн Барри Твист (Barry Twist).

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Сиденья для ванн являются изделиями, предназначенными для людей с нарушенной координацией движения, для более удобного и безопасного принятия водных процедуры.

1.2 Технические характеристики

Для получения более подробных характеристик стоит обратиться к сайту: sims2.ru

Поворотное сиденье для ванны со складной спинкой Барри Твист (Barry Twist).

- С поворотным механизмом для удобной пересадки.
- Каркас изготовлен из нержавеющей стали с белым порошковым покрытием.
- Сиденье и спинка изготовлены из гигиенического, ударопрочного пластика.
- Сиденье и спинка имеют отверстия для отвода воды.
- Сиденье оснащено дополнительными противоскользящими фиксаторами.
- Складная спинка.
- Ножки для установки на края ванны с противоскользящими наконечниками.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.

• 1.3 Упаковка

В комплектации: сиденье, спинка, руководство по эксплуатации

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все ножки надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на изделие не должна превышать 130 кг.
- 2.2 Порядок работы:

1. Поставьте изделие на ванну, рама изделия должна опираться на обе стороны ванны, держите изделие в равновесии.

2. Убедитесь, что крепления находятся напротив стенок ванны. Изделие должно быть прочно зафиксировано.

3. Если вы хотите поменять направление сиденья, необходимо поднять или опустить подъемный рычаг, а затем повернуть сиденье, куда вам необходимо.

3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Артикул № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Сиденье для ванн Барри Твист (Barry Twist):

Производитель: «Валентайн Интернейшнл Лтд.», Тайвань (Китай), Valentine International Ltd., 8F, No. 149, Sec. 2, Ta Tung Road, Hsichih Dist., New Taipei City 221, Taiwan (China).

Поставщик: ООО «СИМС-2»: 125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18 Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Артикул №	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

**Более подробная информация на сайте www.sims2.ru