



Подушка клиновидная Барри Аура (Barry Aura)



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик клиновидной подушки «АУРА» («AURA»).

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Клиновидная подушка для принятия правильной позы во время сна, отдыха, длительного лежания или сидения. Облегчает общее состояние пользователя.

1.2 Технические характеристики

Модель «АУРА» («AURA»).

- Материал подушки: эластичный полимер (EVA)
- Материал чехла: хлопчатобумажная ткань с противоскользящей нижней частью на молнии.
- Размер подушки: 600x250x200 мм
- Вес: 0,4 кг
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

1.3 Упаковка


В комплект входят: подушка - 1 шт., чехол - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., упаковка - 1 шт.

2. Использование по назначению

2.1 Порядок работы

1. Лечь на кровать и принять необходимое положение.
2. Поместить подушку под нужную часть тела.
3. Если требуется поменять положение, необходимо аккуратно вынуть подушку и переместить в другое место.
4. После использования, убрать подушку и принять стандартное положение.
5. Если необходимо просушить или почистить подушку. Откройте замок на молнии и извлеките подушку из чехла.

2.2 Примеры расположения подушки

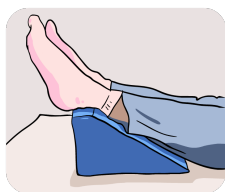

Положение -
ноги выше головы



Боковая поддержка
при беременности



Поддержка при
положении на боку



Поддержка
анатомического
положения ног

3. Техническое обслуживание

3.1 Перед использованием:

1. Проверьте, застегнута ли молния;
2. Проверьте внешнее состояние подушки на предмет повреждений;
3. Удостоверьтесь, что подушка чистая и сухая.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской уточняйте на сайте www.sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии. _____

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Подушка клиновидная АУРА (AURA)

Производитель: “Валентайн Интернейшнл Лтд”, Тайвань, Китай.
Valentine International Ltd, 8th Floor, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd.221
Hsichin City, Taipei Hsien, Taiwan, China.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18.
Тел.: 8(495) 792-31-90, 8(800) 200-31-90.

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru