



Тумбы прикроватные:

ГЕРМАНН (HERMANN),
ЧЕРУСКЕР (CHERUSKER),
ВАРУС (VARUS)

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПРЕДИСЛОВИЕ	3
2	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
2.1	Определение лиц и групп	4
2.2	Информация о безопасности	4
2.2.1	Правила безопасности пользователей	4
2.3	Описание изделия	5
2.3.1	Предназначение	5
2.3.2	Специфические особенности	5
2.3.3	Использованные материалы	6
2.3.4	Комплектация	6
3	ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ	6
3.1	Общая информация	6
3.2	Инструкции по очистке и дезинфекции	6
3.3	Чистящие и дезинфицирующие агенты	7
3.3.1	Обращение с дезинфицирующими веществами	8
4	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
5	ХРАНЕНИЕ	9
6	ТРАНСПОРТИРОВКА	9
	Гарантийные обязательства	10

1 ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый Клиент,
Благодарим Вас за доверие и покупку прикроватных тумб Германн (Hermann), Черускер (Cherusker) и Варус (Varus) производства Burmeier. Каждое изделие тестируется производителем на безопасность и функциональность, и покидает завод в наилучшем состоянии. В данном руководстве содержится информация о функциях, необходимых для применения мебели, поэтому Вы можете регулярно обращаться к данному руководству, как практическому справочнику.

ООО «СИМС-2»

Burmeier GmbH & Co. KG

2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед первым использованием прикроватных тумб:

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы избежать повреждений, вызванных ошибочными действиями.
- Перед использованием проведите влажную обработку или продезинфицируйте прикроватные тумбы.

2.1 Информация о безопасности

Тумбы прикроватные представляют собой изделия, соответствующие современным технологиям. Могут быть использованы только в случае абсолютной уверенности в их исправном состоянии.

2.1.1 Правила безопасности пользователей

- Применение данного руководства, которое должно быть предоставлено вместе с прикроватными тумбами, гарантирует, что каждый пользователь будет ознакомлен с правилами безопасной работы перед ее применением.
- В случае подозрения на повреждения или нарушение функционирования тумб, необходимо произвести их проверку.

2.2 Описание изделия

Конструктивно тумбы прикроватные имеют общие технические характеристики, обеспечивающие высокую степень комфорта.

2.2.1 Предназначение

- Прикроватные тумбы являются комфортабельным решением для облегчения быта и ухода за пожилыми и ослабленными людьми.
- Данные прикроватные тумбы могут быть использованы в домашних условиях.
- Данные тумбы подходят для многократного применения. При повторном использовании необходимо протереть и продезинфицировать, а также провести оценку их состояния.

2.2.2 Специфические особенности

Модель/ характеристики	Германн (без столика/ со столиком)	Черускер	Варус
Вес, кг	32/35	38	23
Габариты (ШхГхВ), см	44,5х45х89 /55х45х89	52х51х87	54х45х57
Встроенный столик	—/+	+	—
Ширина с разложенным столиком, см	—/123	114	—
Фиксация колес	—/4	2	2
Габариты столешницы сервисного столика, см	—/75х36	60х36	—
Максимальная нагрузка на столешницу, кг	—/10	7	—

2.2.3 Используемые материалы

Корпус и фронтальная часть тумб прикроватных выполнены из древесностружечных плит с полимерным покрытием и декоративной отделкой под бук. Для удобства перемещения на тумбы установлены двойные пластиковые колеса (4 шт.). Столешница тумбы прикроватной, а также разделительные перегородки имеют полимерное покрытие толщиной не менее 0,8 мм. Выдвижной ящик и двери тумбы оснащены ручками из твёрдого пластика.

Все применяемые материалы являются экологичными и безопасными для контакта с кожей пользователя.

2.2.4 Комплектация

Тумбы прикроватные поставляется в собранном виде.

3. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

3.1 Общая информация

Очистка – это самое важное требование для эффективной химической дезинфекции. При использовании прикроватных тумб одним и тем же пользователем, регулярная очистка мебели обеспечивает необходимую гигиеническую обстановку.

Прикроватная тумба должна быть протерта и продезинфицирована перед тем, как ею воспользуется новый пользователь!

3.2 Инструкции по очистке и дезинфекции

Прочистить все поверхности тумбы и протереть тканью, смоченной мягким экологически безопасным чистящим агентом.

Если прикроватные тумбы загрязнены инфекционными или потенциально опасными материалами, следует продезинфицировать их обработкой агентами, одобренными для проведения дезинфекции химическим методом и пригодными для соответствующих поверхностей.

Примечание: продолжительная дезинфекция необходима только при наличии у пользователя мультирезистентного патогена. Дезинфекция прикроватных тумб непосредственно на месте имеет то преимущество, что таким образом предотвращается перемешивание «чистой» и «грязной» мебели при их транспортировке. В свою очередь, это препятствует распространению болезнетворных микроорганизмов.

Неиспользуемая прикроватная тумба должна быть отправлена на хранение в накрытом состоянии, для предохранения ее от загрязнения.

3.3 Чистящие и дезинфицирующие агенты

Чтобы максимально продлить срок службы прикроватных тумб следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Поверхность должна быть неповрежденной; любое повреждение должно быть устранено.
- Рекомендуется протирать поверхность прикроватных тумб влажной тканью. Чистящие вещества должны быть мягкими (неагрессивными к коже и поверхности) и экологически чистыми. Можно использовать бытовые очистительные средства.
- Для очистки металлических поверхностей с покрытием, следует использовать мягкую ткань, увлажненную бытовым средством, предназначенным для гигиенической очистки поверхностей бытовой мебели.
- Дезинфекцию прикроватных тумб проводят путем протирки с применением дезинфицирующих средств, одобренных для проведения дезинфекции химическим методом в рекомендованных концентрациях.

Ни в коем случае нельзя применять абразивные средства, которые могут повредить поверхность.

Примечание: Дезинфицирующие средства на альдегидной основе имеют преимущество перед другими, поскольку у них широкий спектр воздействия, относительно низкий протеиновый эффект, и они экологически безвредны. Главный недостаток таких агентов в том, что они могут оказаться аллергенами и раздражителями. Средства на глюкопротеиновой основе не имеют этих недостатков, и обладают высокой эффективностью. Средства на хлорсодержащей основе приводят к коррозии металлов, синтетических материалов, резины и других материалов во время длительного применения или при слишком высоких концентрациях. Таким образом, такие вещества имеют более высокий так называемый протеиновый эффект, являются раздражителями слизистых оболочек и демонстрируют низкую экологическую совместимость.

3.3.1 Обращение с дезинфицирующими веществами

- Необходимо в точности соблюдать дозировку. Рекомендуются автоматические дозаторы.
- Всегда готовить растворы в холодной воде, чтобы избежать образования паров, раздражающих слизистые оболочки.
- Надевать перчатки для исключения контакта с кожей.
- Никогда не следует оставлять готовые дезинфицирующие растворы в открытых сосудах с плавающими на поверхности кусками ткани. Необходимо всегда закрывать контейнеры.
- После завершения дезинфекции провентилировать помещение.
- Дезинфекцию производить протиркой. Исключить распыление, при котором выделяются большие порции вещества, что может привести к его попаданию в дыхательные пути.
- Не следует применять алкоголь для дезинфекции поверхности с большой площадью.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прикроватные тумбы спроектированы и сконструированы для применения в течение длительного времени.

Многократные перемещения, неправильное использование, а также длительное применение могут приводить к повреждениям, появлению дефектов и признаков износа, что может создавать опасность, если не устранять такие дефекты вовремя.

Необходимо проинструктировать пользователей в нижеследующих правилах. Необходимо производить минимальную визуальную проверку состояния прикроватных тумб каждый раз перед повторным применением.

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться к эксперту с требованием о техобслуживании или ремонте. Пользователь ни в коем случае не должен пытаться устранить неисправность самостоятельно.

5. ХРАНЕНИЕ

Упакованные тумбы должны храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей. Хранение надлежит осуществлять при следующих условиях: Температура: от +2 оС до +50оС; относительная влажность: 45 - 75 % (без конденсации); атмосферное давление: 500 - 1060 гПа.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА

Прикроватные тумбы для оборудования палат можно транспортировать любыми видами транспорта. При транспортировании водным, смешанным железнодорожно-водным или авто-водным транспортном упаковке должны прокладываться слоем водонепроницаемой или полиэтиленовой пленки. Температура: от - 20оС до + 50оС; относительная влажность: до 70 % (без конденсации); атмосферное давление: 500 - 1060 гПа.

Технические характеристики товара могут незначительно отличаться из-за постоянного улучшения производителем качества продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на про-изводственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Артикул № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Производитель: «Burmeier GmbH & Co.Kommanditgesellschaft», Германия,
Pivitsheider Str. 270,D-32791 Lage/Lippe

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Артикул №	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

*Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru