



Вспомогательная ступенька с ручкой 10222X (H)



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА _____	3
1.1 Назначение _____	3
1.2 Технические характеристики _____	3
1.3 Комплектация _____	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ _____	4
2.1 Важные предупреждения _____	4
2.2 Порядок работы _____	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ _____	5
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ _____	5

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик вспомогательной ступеньки с ручкой 10222X (Н).

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Данное изделие предназначено для использования в качестве вспомогательной ступеньки. Вспомогательная ручка служит для поддержания равновесия.

1.2 Технические характеристики

материал	Хромированная сталь, резина
высота (см)	85
ширина (см)	35
глубина (см)	28
вес изделия (кг)	3

1.3 Комплектация 10222X (Н):

Двухсторонняя ножка – 2 шт.

Поверхность ступеньки – 1 шт.

Винт барашковый – 5 шт.

Винт барашковый большой – 4 шт.

Ручка для ступеньки – 1 шт.

Трубка для соединения ручки с поверхностью ступеньки – 2 шт.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Перед началом эксплуатации, пожалуйста, проверьте все части на наличие трещин.
- Ни в коем случае не облакачивайтесь всем весом на ручку.
- Это может привести к опрокидыванию и серьезным повреждениям.
- Максимальная нагрузка: 120 кг.

2.2 Порядок работы

Прежде чем приступить к использованию необходимо произвести сборку

- Переверните и положите поверхность вспомогательной ступеньки на ровную и чистую поверхность.
- После чего совместите две двухсторонние ножки над данной ступенькой (проследите, чтобы отверстия на ножках для вкручивания ручки были с одной стороны), так чтобы совпали центральные части и совпали отверстия на поверхности ступеньки и ножках.
- Вкрутите винт барашковый в отверстия на ножках.
- Поставьте ступеньку на ножки.
- После чего поочередно совместите трубку для соединения со ступенькой, так чтобы отверстия на трубке совпали с отверстиями на ножке, далее вкрутите винт барашковый большего размера, чтобы трубка была неподвижна.
- Повторите действия из предыдущего пункта со второй трубкой.
- На трубки наденьте ручку до момента появления кнопки.

3. Техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить водой и не абразивными чистящими средствами.

Во избежание возникновения коррозии, тщательно высушите обработанную поверхность.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Вспомогательная ступенька с ручкой 10222X (H)

Производитель: Valentine International LTD, Тайвань (Китай), 8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

CEC