



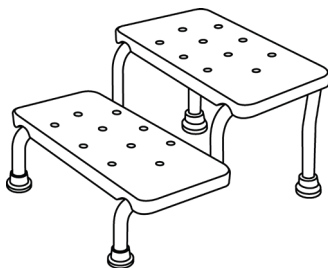

Двухуровневая вспомогательная ступенька 10223

Двухуровневая вспомогательная ступенька с ручкой 10223Н

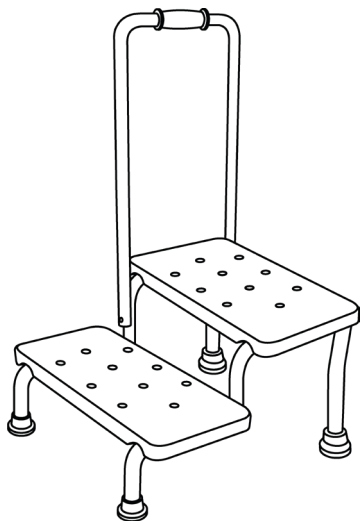

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА _____	3
1.1 Назначение _____	3
1.2 Технические характеристики _____	3
1.3 Упаковка _____	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ _____	4
2.1 Важные предупреждения _____	4
2.2 Порядок работы _____	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ _____	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ _____	5

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик вспомогательной ступеньки 10223 и вспомогательной ступеньки с ручкой 10223Н.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Данные изделия предназначены для использования в качестве вспомогательной ступеньки. Вспомогательная ручка служит для поддержания равновесия.

1.2 Технические характеристики

Характеристики	10223	10223Н
материал	алюминий, пластик	алюминий, пластик
высота (см)	31	93
ширина (см)	41	41
глубина (см)	55	55
вес изделия (кг)	2,7	3

1.3 Упаковка

Комплектация 10223:

- Двухуровневая ножка – 2 шт.
- Поверхность ступеньки – 2 шт.
- Соединительные балки - 4 шт.
- Винт барашковый с шайбой – 16 шт.

Комплектация 10223Н:

- Двухуровневая ножка – 2 шт.
- Поверхность ступеньки – 2 шт.
- Соединительные балки - 4 шт.
- Винт барашковый с шайбой – 18 шт.
- Ручка для ступеньки – 1 шт.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Перед началом эксплуатации, пожалуйста, проверьте все части на наличие трещин.
- Ни в коем случае не облакачивайтесь всем весом на ручку. Это может привести к опрокидыванию и серьезным повреждениям.
- Максимальная нагрузка: 150 кг.

2.2 Порядок работы:

Прежде чем приступить к использованию необходимо произвести сборку:

Для 10223

- Расположите комплектующие на ровной и чистой поверхности.
- Совместите две двухуровневые ножки с помощью соединительных балок, совмещая отверстия на ножках и балках.
- Закрепите конструкцию с помощью барашковых винтов с шайбой, вкручивая их в отверстия.
- Закрепите поверхности ступенек с помощью барашковых винтов с шайбой.

Для 10223Н

- Расположите комплектующие на ровной и чистой поверхности.
- Совместите две двухуровневые ножки с помощью соединительных балок, совмещая отверстия на ножках и балках.
- Закрепите конструкцию с помощью барашковых винтов с шайбой, вкручивая их в отверстия.
- Закрепите поверхности ступенек с помощью барашковых винтов с шайбой.
- Поставьте ступеньку на ножки.
- Совместите ручку с ножками и закрепите с помощью барашковых винтов с обеих сторон.

3. Техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить водой и не абразивными чистящими средствами.

Во избежание возникновения коррозии, тщательно высушите обработанную поверхность.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные

дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Вспомогательная ступенька 10223

Вспомогательная ступенька с ручкой 10223Н

Производитель: Гуандун Дайанг Медикал Технолоджи Ко., Лтд., Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

